

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AngelSounds JPD-100S PRO

Słuchanie tętna płodu / Nagrywanie dźwięku



Przede wszystkim, gratulujemy ciąży!

Te 9 miesięcy (momentami wypełnione bezgraniczną miłością, momentami dające nieźle w kość) to czas, w którym przygotowujesz się na powitanie najpiękniejszego skarbu na świecie - Twojego dziecka!

Pozwól sobie w tym czasie na chwilę czystego, prawdziwego szczęścia, którym dodatkowo możesz obdarzyć swoich bliskich oraz znajomych. Wszystko dzięki nowemu, ulepszonemu **detektorowi tętna płodu AngelSounds JPD-100S PRO**, dzięki któremu możesz:

- **słuchać bicia serca** Twojego dziecka - teraz jeszcze wyraźniej!
- **nagrywać bicie małego serduszka** (a także Twojego serca!) na telefonie/komputerze
- **monitorować tętno malucha**

Poniżej przedstawimy Ci instrukcję obsługi, dzięki której korzystanie z AngelSounds PRO stanie się łatwe, przyjemne i efektywne. Zatem, zaczynamy!

KROK 1

URUCHOMIENIE DETEKTORA ANGELSOUNDS



Rozpoczynamy przygodę z AngelSounds! Dokładną instrukcję użytkowania znajdziesz w opakowaniu. Najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać, to:


- **podłączenie baterii** (nie zapomnij usunąć folii ochronnej z baterii)
- **włączenie detektora** - o tym, że sprzęt jest włączony, świadczy zielona lampka
- dokładne **włożenie kabla łączącego słuchawki z detektorem** w odpowiednie gniazdo i delikatne 'dociśnięcie' go - upewnij się, że końcówka kabla jest wsadzona dokładnie
- delikatne postukanie palcem w sondę detektora pozwoli Ci na sprawdzenie, czy słuchawki działają bez zarzutu - pamiętaj o tym, aby zwiększać głośność stopniowo - nie chciałabyś w końcu 'usłyszeć' ostrego kopniaka swojego malca - uwierz nam, potrafi być głośno ;)
- usiądź lub połóż się wygodnie, załóż słuchawki, **nałóż żel do USG** (lub oliwkę dla niemowląt) **na sondę detektora**, dołóż do tego szczyptę cierpliwości i... wyszukaj najpiękniejszy dźwięk - bicie serca Twojego dziecka!
A jak już je znalazłaś - postaraj się nie zmieniać pozycji, aby nie utracić dźwięku i przygotuj się na...

KROK 2

NAGRYWANIE DŹWIĘKU SERDUSZKA

Jeśli chcesz nagrać tętno dziecka, upewnij się, że wykonałeś wszystkie niezbędne kroki z sekcji powyżej. Następnie wyjmij z opakowania **kabel do połączeń audio** (znajduje się w zestawie - zakończony jest z dwóch stron gniazdem słuchawkowym).

NAGRYWANIE NA KOMPUTERZE PC

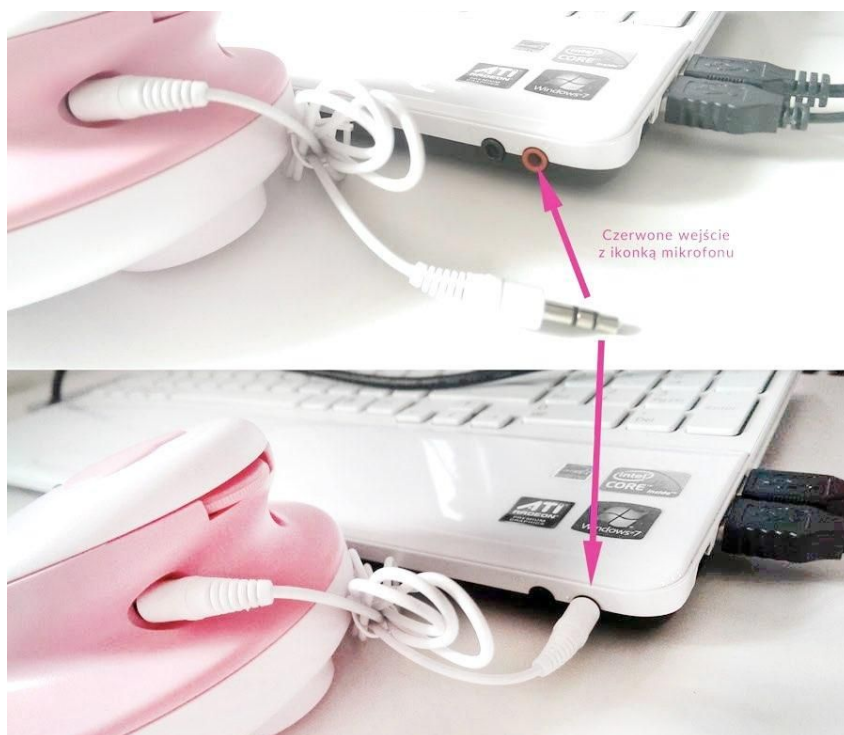

Z SYSTEMEM WINDOWS

- **Umieść jeden koniec kabla w gnieździe słuchawek detektora tętna** (wejście oznaczone ikonką komórki) a **drugi koniec kabla podłącz do gniazda audio/mikrofonu w komputerze** (najczęściej czerwone wejście oznaczone ikonką mikrofonu).
- **Włącz program do nagrywania dźwięku** na komputerze np. „Rejestrator głosu” lub „Rejestrator dźwięku” (program możesz wyszukać w systemie Windows).
- **Kliknij przycisk "Nagraj"** w programie nagrywania dźwięku.
- Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk **"Stop"**.
- Pamiętaj, aby zapisać nagrania w komputerze, klikając przycisk **„Zapisz”!**

NAGRYWANIE NA KOMPUTERZE MAC



- **Umieść jeden koniec kabla w gnieździe słuchawek detektora tętna** (wejście oznaczone ikonką komórki) a **drugi koniec podłącz do gniazda audio/ mikrofonu w komputerze**.
- **Włącz program odtwarzacza „Quicktime Player”** (możesz też użyć innego programu do nagrywania dźwięku).
- Wybierz „Plik”, a następnie „Nowe nagranie audio”.
- Zaczynij nagrywać i pamiętaj, żeby zapisać nagranie!

NAGRYWANIE NA TELEFONIE KOMÓRKOWYM



- **Umieść jeden koniec kabla w gnieździe słuchawek detektora** (wejście oznaczone ikonką komórki) a **drugi koniec podłącz do gniazda słuchawek w telefonie**
- **Użytkownicy Iphone:** możesz wybrać np. wbudowany program „Dyktafon” lub pobrać inną aplikację do rejestracji dźwięku. W programie „Dyktafon” możesz łatwo udostępnić nagranie na Facebooku - kliknij ikonkę udostępniania po kliknięciu w nazwę nagrania.
Użytkownicy Android: wybierz dowolny program do nagrywania dźwięku.
- Zaczynij nagrywać i pamiętaj, aby zapisać nagrania!

UWAGA - nowe smartfony iPhone wymagają specjalnego adaptera, ponieważ nie mają standardowego gniazda słuchawkowego.

WSKAZÓWKA:

Jeśli masz nagrania na komputerze lub w telefonie, możesz łatwo udostępnić je np. na Facebooku. Możesz też nagrać plik na pendrive lub CD i uczynić go świetnym prezentem dla rodziny lub znajomych. Co więcej, możesz też nagrać swoje bicie serca i odtwarzać je nowo narodzonemu dziecku - może to być najszybszy i najskuteczniejszy sposób na jego uspokojenie, gdy inne metody zawiodą.



Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci zapoznać się z naszym detektorem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wątpliwości lub chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, skontaktuj się z nami - biuro@angelsounds.pl.

Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi, ponieważ zadowolenie naszych Klientów stawiamy na pierwszym miejscu!

www.AngelSounds.pl

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej instrukcji są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje NDI Group Natalia Kostusiak. Żadna ich część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakiegokolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody NDI Group Natalia Kostusiak.